


Pasos en la cementación después del grabado con: Zirconia Etchant Cloud System



1. Prueba Intraoral.

Revisar la superficie oclusal y proximal entre prótesis y dientes. Suavizar la superficie si fuera necesario.

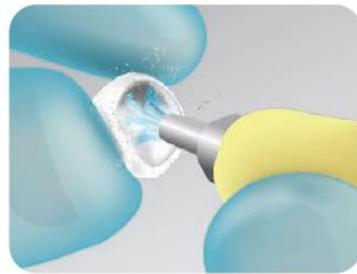


2. Limpiar y secar.

Limpiar con restos de saliva con agua en spray o alcohol, secar, eliminar proteínas de la saliva aplicando ácido orto fosfórico o Ivoclean y secar de nuevo adecuadamente con aire hasta que desaparezca cualquier resto de humedad.



3. Silanización.

Antes de la cementación, aplicar imprimación con **Primer (que contenga 10 MDP)** y secar durante 60 segundos.

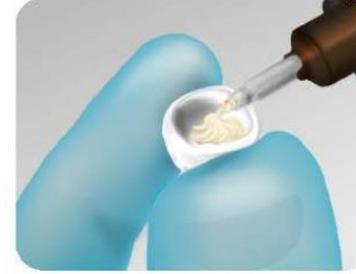

4. Cementación.

Aplicar cemento en base a resina adhesiva o autoadhesivo de alto rendimiento que contenga **(10 MDP)**.



5. Restauración final.

Mantener las restauraciones en su lugar hasta que el cemento polimerice. Eliminar en el proceso el exceso de cemento.

CEMENTO RECOMENDADO

